

ARNOMED DesiQuick

Alkohohaltige Flächendesinfektion

Produktbeschreibung

ARNOMED DesiQuick ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Flächendesinfektionsmittel. Es ist aldehyd- und QAV-frei und eignet sich zur schnellen Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen.

Bemerkungen

ARNOMED DesiQuick ist einsetzbar zur Desinfektion von Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte und Oberflächen im medizinischen Umfeld, Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Die Flächendesinfektion ist HACCP-konform gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und kann sicher im Rahmen von HACCP-Konzepten im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Medizinproduktklasse IIa

CE 0044



Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

Ausführungen

Art.-Nr.	Gebindegröße	Gebindeart	Stk. / Krt.
541-500	500 ml	Flasche	18
541-1000	1000 ml	Flasche	12
541-5000	5 L	Kanister	2
541-10000	10 L	Kanister	1

Biozidregistriernummer

N-119296

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Anwendungshinweise

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Das gebrauchsfertige Produkt vorzugsweise im Wischverfahren mit einem sauberen Einmaltuch verwenden. Oberflächen vollständig benetzen, Einwirkzeiten beachten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Eine Sprühdesinfektion auf Bereiche beschränken, die durch Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Flächen und Arbeitsgeräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle überprüfen.

Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Belastung	Einwirkzeit	Norm
Bakterizid (mit Mechanik)	niedrig	1 Min.	EN 13727, EN 1276, EN 16615*
Levurozid (mit Mechanik)	niedrig	1 Min.	EN 13624, EN 1650, EN 16615*
Begrenzt viruzid – Modified Vaccinia Ankara (mit Mechanik)	niedrig	1 Min.	EN 14476, Virus-4-Felder-Test**
Bakterizid (ohne Mechanik)	niedrig	1 Min.	EN 13727, EN 1276, EN 13697
Levurozid (ohne Mechanik)	niedrig	1 Min.	EN 13624, EN 1650, EN 13697
Begrenzt viruzid – Modified Vaccinia Ankara (ohne Mechanik)	niedrig	1 Min.	EN 14476, EN 16777
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)	niedrig	1 Min.	EN 14476
Tuberkulozid (M. terrae)	niedrig	1 Min.	EN 14348
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	hoch	5 Min.	EN 14348

*getestet an Referenz Tuch | **in Anlehnung an EN 16615

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
50 g Ethanol.

Lagerung & Haltbarkeit

- Haltbarkeit: 36 Monate
- Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
- Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig verschließen. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor unbefugtem Zugriff schützen.

Sicherheitshinweise (CLP)

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt und Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Letzte Änderungen

21.05.2026

Achtung



Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
47906 Kempen
+49 (0)2152 5565-0



ARNOWA GmbH
Haltiger Feld 13
33154 Salzkotten
Germany

Telefon: 05258 22 08 20
Telefax: 05258 22 08 299
E-Mail: info@arnowa.de
Web: www.arnowa.de