

ARNOMED DesiQuick Wipes

Alkoholhaltige Desinfektionstücher

Produktbeschreibung

ARNOMED DesiQuick Wipes sind gebrauchsfertige, alkoholische Tücher zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern und aldehyd- und QAV-frei.

Bemerkungen

ARNOMED DesiQuick Wipes eignen sich zur Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und in der häuslichen Pflege sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Die Desinfektionstücher sind HACCP-konform gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und können sicher im Rahmen von HACCP-Konzepten im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Medizinproduktklasse IIa

CE0044



Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

Ausführungen

Art.-Nr.	Inhalt	Gebindeart	Tuchgröße	Stk. / Krt.
551-80	80 Tücher	Flowpack	20 x 20 cm	12

Anwendungshinweise

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.



Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Belastung	Einwirkzeit	Norm
Bakterizid	niedrig	1 Min.	EN 13727*, EN 1276*, EN 16615
Levurozid	niedrig	1 Min.	EN 13624*, EN 1650*, EN 16615
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	niedrig	1 Min.	EN 14476, Virus-4-Felder-Test**
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)	niedrig	1 Min.	EN 14476
Tuberkulozid (M. terrae)	niedrig	1 Min.	EN 14348
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	hoch	5 Min.	EN 14348

*getestet an der Tränklösung | **in Anlehnung an EN 16615

Biozidregistriernummer N-119298

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten: 50 g Ethanol.

Lagerung & Haltbarkeit

- Haltbarkeit: 36 Monate
- Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage
- Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig verschließen. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor unbefugtem Zugriff schützen.

Sicherheitshinweise (CLP) Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzbekleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz und Schutzhandschuhe tragen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt und Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Letzte Änderungen 21.05.2026

Achtung

