

ARNOMED DesiQuick Zero

Alkoholfreie Flächendesinfektion

Produktbeschreibung

ARNOMED DesiQuick Zero ist eine gebrauchsfertige, alkohol- und aldehydfreie Desinfektionslösung zur Schnelldesinfektion wischbeständiger Oberflächen. Die Flächendesinfektion ist besonders geeignet für empfindliche Oberflächen.

Bemerkungen

ARNOMED DesiQuick Zero eignet sich zur Schnelldesinfektion wischbeständiger Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

Medizinproduktklasse IIa (außer Artikel 542-500 – nur Biozidprodukt)

CE0044



Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

Ausführungen

Art.-Nr.	Gebindegröße	Gebindeart	Stk. / Krt.
542-500	500 ml	Flasche	18
542-1000	1000 ml	Flasche	12
542-5000	5 L	Kanister	2
542-10000	10 L	Kanister	1

Biozidregistriernummer

N-119295

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungshinweise

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Das gebrauchsfertige Produkt vorzugsweise im Wischverfahren mit einem sauberen Einmaltuch verwenden. Oberflächen vollständig benetzen, Einwirkzeiten beachten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Eine Sprühdesinfektion auf Bereiche beschränken, die durch Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Flächen und Arbeitsgeräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle überprüfen.



Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Belastung	Einwirkzeit	Norm
Bakterizid (mit Mechanik)	hoch	1 Min.	EN 13727, EN 16615*
Levurozid (mit Mechanik)	hoch	1 Min.	EN 13624, EN 16615*
Bakterizid (ohne Mechanik)	hoch	1 Min.	EN 13727, EN 1276***, EN 13697
Levurozid (ohne Mechanik)	hoch	1 Min.	EN 13624, EN 1650***, EN 13697
Tuberkulozid (M. terrae)	hoch	60 Min.**	EN 14348
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	hoch	1 Min.	EN 14476, Virus-4-Felder-Test****
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)	hoch	60 Min.**	EN 14476

*getestet an Referenz Tuch

**nicht für patientennahe Oberflächen

***Lebensmittelbereich

****in Anlehnung an EN 16615

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten:
0,1 g 2-Phenoxyethanol; 0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid;
0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin.

Lagerung & Haltbarkeit

- Haltbarkeit: 36 Monate
- Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
- Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig verschließen. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor unbefugtem Zugriff schützen.

Sicherheitshinweise (CLP)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt und Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Letzte Änderungen

21.05.2026

