

ARNOMED Dry Wipes

Trockene Vliestuchrolle

Dry Wipes

Produktbeschreibung

Product Description

Trockene Vliestuchrolle zum Tränken in einem passenden Spendersystem (z.B. ARNOMED Spendereimer I Produktnummer: 559) mit einem geeigneten Desinfektionsmittel.

Dry Wipes in combination with a suitable dispenser system (e.g. ARNOMED dispenser bucket I product number: 559) with a suitable disinfectant.

Ausführungen

Variations



| Artikelbezeichnung Article Description | Box-Inhalt Content | Größe Size | Art.-Nr. REF | EAN EAN | Rollen/VE Packs/PU |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Trockene Vliestuchrolle Dry Wipes | 70 Stück 70 pcs | 28 x 30 cm | 555-70 | 4260597521517 | 8 Rollen 8 packs |
| Trockene Vliestuchrolle Dry Wipes | 90 Stück 90 pcs | 28 x 30 cm | 555-90 | 4260597521531 | 8 Rollen 8 packs |
| Trockene Vliestuchrolle Dry Wipes | 140 Stück 140 pcs | 15 x 30 cm | 555-140 | 4260597521555 | 8 Rollen 8 packs |

Gebrauchsanweisung

Instructions For Use

Legen Sie die ARNOMED Dry Wipes in das Spendersystem: ARNOMED Spendereimer für trockene Vliestuchrollen (Art.-Nr. 559). Die trockenen Vliestuchrollen eignen sich in Kombination mit gebrauchsfertigen Flächen- und Schnelldesinfektionsmitteln. Tränken Sie die trockenen Vliestuchrollen mit ca. 1,4 Litern (für 70/ 140 Stk.) bzw. 1,7 Litern (für 90 Stk.) Ihrer gewählten Desinfektionslösung.

Place the ARNOMED Dry Wipes in the dispenser system: ARNOMED dispenser bucket for dry wipes (art. no. 559). The dry wipes are suitable in combination with ready-to-use surface and rapid disinfectants. Soak the dry wipes with 1.4 litres (for 70/140 pieces) | 1.7 litres (for 90 pieces) of your chosen disinfectant solution.



Weitere Anwendungshinweise*Further Instructions For Use*

1. Tragen Sie **auf dem beiliegenden Etikett die nachfolgenden Daten** ein: Name des verwendeten Desinfektionsmittels, Chargennummer, Konzentration, Einwirkzeit, Befüllungs- und Mindesthaltbarkeitsdatum (maximal: 28 Tage).
2. Befestigen Sie das **ausgefüllte Etikett klar ersichtlich** auf Ihrem Spendersystem. Lesen Sie zuvor die Gebrauchsanweisung und Gefahrenhinweise des genutzten Desinfektionsmittels.
 1. *Enter the following data on the enclosed label: Name of the disinfectant used, batch number, concentration, exposure time, filling date and best-before date (maximum: 28 days).*
 2. *Attach the completed label to your dispenser system so that it is clearly visible. Read the instructions for use and hazard warnings of the disinfectant used beforehand.*

Haltbarkeit*Durability*

3 Jahre

3 years

Standzeit*Service Time*

max. 28 Tage

*max. 28 days***Symbole***Symbols*