

ARNOMED SOFORT-KÜHLPACK

Sofort-Kühlpack zur Kältebehandlung Instant Cold Pack For Cold Treatment



Produktbeschreibung Product Description

Sofort-Kältepack zur schnellen lokalen Kältebehandlung. Aktivierung durch einfaches Zusammendrücken, wirkt innerhalb weniger Sekunden.

Instant cold pack for quick local cold therapy. Activated by simple squeezing, effect within seconds.

Bemerkungen Remarks

Geeignet für: Verstauchungen, Muskelkater, Migräne, Zahnschmerzen, Insektenstiche

Suitable for: sprains, muscle soreness, migraine, toothache, insect bites

Inhaltsstoffe Ingredients

Harnstoff, Wasser
Urea, Water

Ausführungen Variations

Art.-Nr. REF	Produktname Material	Maße Size	Verpackungseinheit Packaging Unit
931-S-5	ARNOMED Sofort-Kühlpack ARNOMED Instand Cold Pack	8x13cm	5 Stk./Box 20 Boxen/Krt. 5 pc./box 20 boxes/crt.
931-M-5	ARNOMED Sofort-Kühlpack ARNOMED Instand Cold Pack	12x15cm	5 Stk./Box 18 Boxen/Krt. 5 pc./box 18 boxes/crt.
931-L-5	ARNOMED Sofort-Kühlpack ARNOMED Instand Cold Pack	15x17cm	5 Stk./Box 12 Boxen/Krt. 5 pc./box 12 boxes/crt.
931-S-10	ARNOMED Sofort-Kühlpack ARNOMED Instand Cold Pack	8x13cm	10 Stk./Box 10 Boxen/Krt. 10 pc./box 10 boxes/crt.
931-M-10	ARNOMED Sofort-Kühlpack ARNOMED Instand Cold Pack	12x15cm	10 Stk./Box 10 Boxen/Krt. 10 pc./box 10 boxes/crt.
931-L-10	ARNOMED Sofort-Kühlpack ARNOMED Instand Cold Pack	15x17cm	10 Stk./Box 5 Boxen/Krt. 10 pc./box 5 boxes/crt.



Gebrauchsanweisung Instructions for Use

1. Zur Aktivierung das Kühlpack fest zusammendrücken, bis der innere Beutel platzt.
 2. Das Kühlpack schütteln, um den Inhalt zu mischen.
 3. Das Kühlpack vor Gebrauch in ein Tuch wickeln.
1. Firmly squeeze the cold pack to break the inner pouch and activate it.
 2. Shake the cold pack to mix the content.
 3. Wrap the cold pack in a cloth before use.

Warnhinweise Warnings

Nur zur äußeren Anwendung. Nicht erneut einfrieren. Produkt vor Gebrauch prüfen, undichte Packungen entsorgen. Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und nur entsprechend anwenden. Nicht für sensorisch empfindliche Personen geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken – im Notfall Giftnotrufzentrale oder Arzt kontaktieren. Bei Beschädigung und Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Beutel nicht öffnen, durchstechen oder entzündlichen Stoffen aussetzen.

For external use only. Do not refreeze. Inspect the product before use and dispose of any damaged packs. Read the instructions carefully and follow them. Not suitable for individuals with sensory impairments. Keep out of reach of children. Harmful if swallowed – in case of emergency, contact poison control or a doctor. If the liquid comes into contact with skin or eyes, rinse with water and seek medical attention. Do not open, puncture, or expose the pouch to flammable substances.

Sicherheitsinformationen Safety Information

- Bei Raumtemperatur zwischen 20–24°C anwenden.
- Kühlleistung bis 15 × 23cm:
≤ 4°C, max. Temperaturanstieg ≤ 12°C nach 15 Min.
- Kühlleistung ab 15 × 23cm und größer:
≤ 4°C, max. Temperaturanstieg ≤ 10°C nach 15 Min.
- Use at room temperature between 20–24°C.
- Cooling performance for sizes up to 15 × 23cm:
≤ 4°C, maximum temperature rise ≤ 12°C after 15 minutes
- Cooling performance for sizes of 15 × 23cm and larger:
≤ 4°C, maximum temperature rise ≤ 10°C after 15 minutes

Lagerung Storage

Trocken, bei Raumtemperatur, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Store dry, at room temperature, and protect from direct sunlight.

Haltbarkeit Shelf Life

4 Jahre nach Produktionsdatum
4 years from the production date

Letzte Änderungen Last Changes

09.07.2025

