

ARNOMED SUPERDRY



Einweg Bettschutzunterlage mit Zellstoffflocken und SAP

Disposable Underpad with Cellulose Flakes and SAP

Produktbeschreibung

Product Description

Einweg Bettschutzunterlagen aus Zellstoffflocken und SAP (superabsorbierendem Polymer) dienen als Schutzschicht für Oberflächen, die vor Flüssigkeiten geschützt werden sollen. Das saugfähige Material bildet eine weiche Barriere, insbesondere bei Inkontinenz, um das Eindringen von Urin und anderen Körperflüssigkeiten zu verhindern. Für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Disposable underpads with cellulose flakes and SAP (superabsorbent polymer) protect surfaces from fluids. The absorbent material forms a soft barrier to prevent the penetration of urine and other body fluids, especially in the case of incontinence. Intended for single use.

Bemerkungen

Remarks

Eignet sich für medizinische Einrichtungen, die ambulante und häusliche Pflege sowie als Trainingspads für Hunde.

Suitable for medical facilities, care sector and as training pads for dogs.

Ausführungen

Variations

ARNOMED Bettschutzunterlage, unsteril, blau/weiß

ARNOMED underpad, non sterile, blue/white

Art.-Nr. <i>REF</i>	Produktname <i>Product Name</i>	Größe <i>Size</i>	Material <i>Material</i>	Saugleistung <i>Absorption</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging Unit</i>
623-60x40	SUPERDRY PLUS	ca. 60x40 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	470ml ± 10%	30 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>30 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
623-60x60	SUPERDRY PLUS	ca. 60x60 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	740ml ± 10%	30 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>30 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
623-60x90	SUPERDRY PLUS	ca. 60x90 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	1130ml ± 10%	30 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>30 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
624-60x40	SUPERDRY	ca. 60x40 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	410ml ± 10%	25 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>25 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
624-60x60	SUPERDRY	ca. 60x60 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	690ml ± 10%	25 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>25 pcs/bag; 8 bags/crt</i>
624-60x90	SUPERDRY	ca. 60x90 cm	Flockig mit SAP <i>Flaky with SAP</i>	850ml ± 10%	25 Stk./Beutel; 8 Beutel/Krt. <i>25 pcs/bag; 8 bags/crt</i>



Qualitätssicherung Quality Management

Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung

Medical device with CE Marking

Hautfreundlichkeit von Dermatologen bestätigt.

Skin friendliness confirmed by dermatologists.



Inhaltsstoffe Components

1. Lage: Vliesstoff
2. Lage: Zellstoff
3. Lage: Zellstoff-Flocken und SAP
4. Lage: Zellstoff
5. Lage: Polyethylen

1. layer: Non-Woven
2. layer: Cellulose
3. layer: Cellulose Flakes & SAP
4. layer: Cellulose
5. layer: Polyethylene

Haltbarkeit Durability

3 Jahre

3 years

Lagerung Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight.

Anwendungsschritte Application steps

1. Vorbereitung:

Wählen Sie die passende Größe der Unterlage und legen Sie diese flach auf die gewünschte Fläche. Achten Sie darauf, dass die saugfähige Seite nach oben zeigt.

1. Preparation:

Select the appropriate size of carpet pad and lay it flat on the desired surface. Ensure that the absorbent side is facing upwards.

2. Platzierung:

Positionieren Sie die Krankenunterlage unter dem Patienten oder an der zu schützenden Stelle.

2. Positioning:

Position the patient pad under the patient or on the area to be protected.

3. Entsorgung:

Nach der Verwendung die Unterlage vorsichtig zusammenrollen, um Flüssigkeiten einzuschließen, und gemäß den geltenden Hygienevorschriften entsorgen.

3. Disposal:

After use, carefully roll up the pad to contain liquids and dispose of in accordance with the applicable hygiene regulations.

Letzte Änderungen Last Changes

16.01.2025

