


Technisches Datenblatt



MaiMed® MyClean DS

Desinfektionstücher

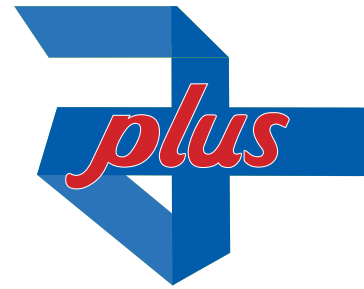

Alkoholische Schnelldesinfektion

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), mykobakterizid und begrenzt viruzid PLUS (alle behüllten Viren gemäß aktueller RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Auftrocknen
- Aldehydfrei
- Tränkflüssigkeit VAH-gelistet

Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkohol- und wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten sowie Gegenständen in Kliniken, Praxen, patientennahem Umfeld und im Lebensmittelbereich (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Materialbeständigkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen. Flächen vollständig abwischen und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Ggf. mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und invasiven Medizinprodukten geeignet.

Ausführungen:

MaiMed® MyClean DS – Desinfektionstücher

Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	Neutral	120 Stück	79623	4046153116331	10305887	12 Pack
Desinfektionstücher	Lemon	120 Stück	79624	4046153116355	10305893	12 Pack
Desinfektionstücher	Pfirsich	120 Stück	79625	4046153116379	10305901	12 Pack
Desinfektionstücher	Apfel	120 Stück	79626	4046153116393	10305918	12 Pack

Einwirkzeiten:


Einwirkzeiten für den Hygienebereich	
Bakterizid, levurozid mit Mechanik (EN 13624, EN 13727 und EN 16615; hohe Belastung):	1 Minute
Mykobakterizid (nach VAH-Methode; hohe Belastung):	5 Minuten
Tuberkulozid (EN 14348; geringe Belastung):	1 Minute
Einwirkzeiten für den Lebensmittelbereich (nur Neutral)	
Bakterizid, levurozid ohne Mechanik (EN 1276, EN 1650 und EN 13697; niedrige Belastung):	5 Minuten
Viruzidie nach EN 14476	
Begrenzt viruzid PLUS:	1 Minute
Vaccinia-Viren (geringe Belastung):	1 Minute
Adeno-Viren (geringe Belastung):	1 Minute
Noro-Viren (geringe Belastung):	1 Minute



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1–7
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MaiMed® MyClean DS-Desinfektionstücher-2021-05

Technisches Datenblatt

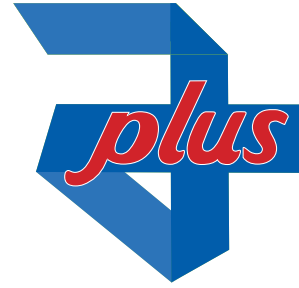

MaiMed® MyClean DS

Desinfektionstücher



Zusammensetzung: In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoffe: 50 g Ethanol

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, HACCP
Medizinprodukt: Klasse IIa

UFI: 3K80-S0U9-C00D-YCCD (Neutral)

UFI: 91D0-10F5-M006-F0NY (Duftrichtungen)

eClass: 30-30-01-02

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:

CE
0482



UN 3175



Achtung



MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MaiMed® MyClean DS-Desinfektionstücher-2021-05