

ARNOMED DesiHands Forte

Alkoholhaltige Händedesinfektion

Produktbeschreibung

ARNOMED DesiHands Forte ist ein gebrauchsfertiges, alkoholhaltiges Produkt zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Die Händedesinfektion wirkt bereits nach 30 Sekunden und verfügt über ein breites Wirkspektrum gegenüber behüllten und unbehüllten Viren. Sie ist rückfettend, parfümfrei, dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ von Dermatest® bewertet.

Bemerkungen

ARNOMED DesiHands Forte ist in allen Bereichen mit erhöhtem Hygienierisiko einsetzbar, darunter medizinische Einrichtungen, Industrie, öffentliche Einrichtungen und der private Bereich. Die Händedesinfektion ist HACCP-konform gemäß EU-Verordnung (EG) Nr. 853/2004 und kann sicher im Rahmen von HACCP-Konzepten im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.



Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid

Ausführungen

Art.-Nr.	Gebindegröße	Gebindeart	Stk. / Krt.
511-100	100 ml	Flasche	42
511-500	500 ml	Flasche	18
511-1000	1000 ml	Flasche	10
511-5000	5 L	Kanister	2



Anwendungshinweise

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände mit Wasser und Seife reinigen. Nasse Hände vor der Desinfektion trocknen.

Hygienische Händedesinfektion

Ca. 3 ml in eine Handfläche geben und für mindestens 30 Sekunden mit beiden Händen intensiv verreiben. Darauf achten, dass die Hände, Fingerzwischenräume, Nagelwinkel und Hautfalten während der gesamten Einwirkzeit vollständig benetzt bleiben. Bei Bedarf nachdosieren.

Chirurgische Händedesinfektion

Ausreichende Menge einreiben, sodass alle Bereiche der Hände einschließlich Interdigitalbereich und Nagelfalz für 2 Minuten vollständig benetzt sind. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten und bei Bedarf nachdosieren.

Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Belastung	Einwirkzeit	Norm
Hygienische Händedesinfektion	niedrig	30 Sek.	EN 13727, EN 13624, EN 1500
Chirurgische Händedesinfektion	niedrig	2 Min.	EN 13727, EN 13624, EN 12791
Tuberkulozid	niedrig	30 Sek.	EN 14348
Mykobakterizid	niedrig	30 Sek.	EN 14348
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	niedrig	30 Sek.	EN 14476
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)	niedrig	30 Sek.	EN 14476
Viruzid (Poliovirus Typ 1)	niedrig	30 Sek.	EN 14476

Biozidregistriernummer

N-119293

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
73,5 g Ethanol.

Lagerung & Haltbarkeit

- Haltbarkeit: 36 Monate
- Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate
- Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig verschließen. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor unbefugtem Zugriff schützen.

Sicherheitshinweise (CLP)

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. Inhalt und Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Letzte Änderungen

21.05.2026



Gefahr



Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
47906 Kempen
+49 (0)2152 5565-0



ARNOWA GmbH
Haltiger Feld 13
33154 Salzkotten
Germany

Telefon: 05258 22 08 20
Telefax: 05258 22 08 299
E-Mail: info@arnowa.de
Web: www.arnowa.de