

ARNOMED DesiQuick Wipes Zero

Alkoholfreie Desinfektionstücher

Produktbeschreibung

ARNOMED DesiQuick Wipes Zero sind gebrauchsfertige, aldehydfreie und alkoholfreie Desinfektionstücher zur Desinfektion wischbeständiger Oberflächen. Das Tuchmaterial ist aus cellulosischen Fasern.

Bemerkungen

ARNOMED DesiQuick Wipes Zero eignen sich zur Desinfektion wischbeständiger Medizinproduktoberflächen, Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld sowie Oberflächen in der Industrie, Lebensmittelbereichen und in der häuslichen Pflege. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.

Medizinproduktklasse IIa

CE 0044



Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)

Ausführungen

Art.-Nr.	Inhalt	Gebindeart	Tuchgröße	Stk. / Krt.
552-80	80 Tücher	Flowpack	20 x 20 cm	12

Anwendungshinweise

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.



Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Belastung	Einwirkzeit	Norm
Bakterizid (mit Mechanik)	hoch	1 Min.	EN 13727*, EN 1276*
Levurozid (mit Mechanik)	hoch	1 Min.	EN 13624*, EN 1650*, EN 16615
Tuberkulozid (M. terrae)	hoch	60 Min.**	EN 14348*
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	hoch	1 Min.	EN 14476*
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	niedrig	1 Min.	mod. EN 16615
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)	hoch	60 Min.**	EN 14476*

*getestet an der Tränklösung

**nicht für patientennahe Oberflächen

Biozidregistriernummer N-119300

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoffe enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol; 0,35 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin.

Lagerung & Haltbarkeit

- Haltbarkeit: 36 Monate
- Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage
- Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig verschließen. Nur feuchte Tücher verwenden. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor unbefugtem Zugriff schützen.

Sicherheitshinweise (CLP)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt und Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Letzte Änderungen

21.05.2026

